

Olá vet, tudo bom?

Estamos disponibilizando agora microtubos para coletas especiais, em animais de pequeno porte e felinos!

Entendemos que muitas vezes a coleta do exame é dificultosa e o volume coletado fica longe do ideal. Gostaríamos de ressaltar que **para garantirmos nossa qualidade seguimos protocolos** e algumas vezes precisamos pedir que a amostra seja recoletada.

Além do volume crítico, algumas outras alterações também são consideradas erros pré-analíticos graves e podem prejudicar o resultado do exame, e por consequência, o tratamento do seu paciente. **Para mais informações e orientações sobre coleta**, visite nosso site: www.saocamiloveterinaria.com.br/exames_pet/orientacoes-sobre-amostras/

Como nosso principal foco é servir realmente como **parceiro e apoio aos nossos clientes**, enxergamos então a necessidade de disponibilizar os microtubos para que amostras de pouco volume não sejam prejudicadas pela grande quantidade de EDTA presente no tubo normal, feito para 2 a 4 ml de sangue.

Gostaríamos de explicar alguns detalhes importantes sobre o microtubo:

- Ele é indicado para coletas específicas em animais de pequeno porte e felinos
- Seu volume máximo é de 0,5 ml. Esse volume deve ser respeitado visando a quantidade proporcional de EDTA que existe no tubo (volumes maiores que 0,5 ml podem levar a formação de coágulos).
- Volumes maiores devem ser coletados em tubos de EDTA de tamanho normal.
- **Certifique-se de fechar corretamente o microtubo para evitar vazamento. A tampinha deve ser encaixada e você precisa escutar um "click".**
- Lembre-se de homogeneizar a amostra corretamente e delicadamente.
- Ressaltamos que, dependendo do número de exames solicitados, fica inviável a realização de todos com apenas 0,5 ml de amostra.

Estamos a disposição para tirar suas dúvidas, trocar idéias, ajudar em seus casos clínicos e facilitar o seu dia-a-dia. Por favor, não hesite em nos procurar!

**Equipe técnica,
São Camilo Veterinária**

